

## PRA3-TESTI

### Testi tilataan osoitteesta

- <http://www.ahtdnateesting.co.uk/>

*(HUOM! Saadaksesi pennulle virallisen testituloksen, joka julkaistaan rotuyhdistyksen sivuilla, pennun tulee olla tunnistusmerkitty ja rekisteröity testipaketin tilaushetkellä)*

### Ohjeet testin ottamista ja lähettämistä varten:

- Testipaketti tulee kotiin noin viikossa.
- Täytä kotona valmiiksi koirakohtaiset tiedot kirjekuoreen.
- Varaa aika eläinlääkärille, joka tarkistaa mikrosirun ja ottaa näytteen pyörittämällä harjaa koiran ikenissä. Joka koirasta laitetaan nimettyyn näytekoureen kaksi harjaa (näytettä).
- Harjojen on oltava **ehdottomasti kuivia** ennen kuin ne suljetaan kuoreen.
- Älä laita kuorta mukana tulleeeseen muovipussiin.
- Ota tai pyydä eläinlääkäriä ottamaan kopio lähetteestä, jonka eläinlääkäri on täyttänyt omalta osaltaan. Tämä siksi, että voit tarvita sitä myöhemmin todistaaksesi, että mikrosiru on tarkistettu ja näytteen on ottanut eläinlääkäri.
- Postita lähete ja suljettu kuori AHT:lle samanlaisessa postituskuoressa, kuin se on tullut sinulle kotiin. Osoite on mukana tullessa ohjeessa.
- AHT:lta tulee vastaus omaan sähköpostiisi, kun tulos on varmistunut tai kirjeessä, jos olet valinnut sen vastausosoitteeksi tilausta tehdessäsi. Sähköpostissa saat tuloksen nopeammin.